

connexx



Slim-RIC Travel Charger 2

Ghid de utilizare

Cuprins

Înainte de a începe	4
Utilizare zilnică	8
Încărcarea	8
Încărcarea bateriei interne a încărcătorului	20
Verificarea capacității bateriei încărcătorului	27
Întrebări puse frecvent	30
Întreținere și îngrijire	34
Curățarea	34
Întreținere profesională	35

Informații importante privind siguranța	36
Informații privind siguranța pentru bateriile reîncărcabile cu litiu-ion	36
Informații privind siguranța pentru încărcător	41
Informații suplimentare	49
Condiții de operare, transport și depozitare	49
Date tehnice privind sursa de alimentare	51
Informații privind eliminarea	52
Explicarea simbolurilor	53
Depanarea pentru încărcător	58
Informații importante	62
Informații privind conformitatea pentru încărcător	62
Informații specifice fiecărei țări	64

Înainte de a începe

Acest dispozitiv este destinat încărcării aparatelor noastre auditive specifice cu baterii încorporate (baterii reîncărcabile litiu-ion). Audiologul dumneavoastră vă va oferi informații în privința modelelor compatibile.

Încărcătorul este destinat exclusiv utilizării în interior. Respectați și urmați condițiile de operare din secțiunea „Condiții de operare, transport și depozitare”.

Încărcătorul nu este destinat să fie utilizat ca mijloc de depozitare pentru transportul aparatelor auditive.




ATENȚIE

Citiți în întregime acest ghid de utilizare și urmați informațiile de siguranță din acest document pentru a evita deteriorările sau rănille.



Este posibil ca dispozitivul să nu arate exact ca ilustrațiile orientative din aceste instrucțiuni. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări pe care le considerăm necesare.

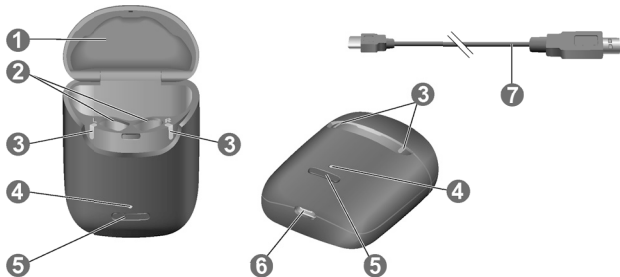


-
- | | |
|---|---------------------------------------|
| ❶ Capac | ❺ Buton |
| ❷ Sloturi de încărcare | ❻ Port USB pentru sursa de alimentare |
| ❸ Instrumente auditive cu LED-uri care indică stăutul | ❼ Cablu de alimentare USB |
| ❹ Încărcător cu LED-uri de stare | |
-

Utilizare zilnică

Încărcarea

În plus Slim-RIC Travel Charger 2 ❶, oferim Charging+ Station SR ❷. Pentru informații suplimentare despre acest încărcător, vă rugăm să contactați audiologul dumneavoastră și să urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare.

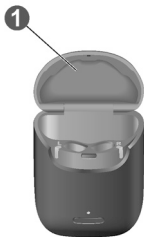


Cum puteți utiliza încărcătorul

Puteți utiliza încărcătorul în trei moduri diferite.

Încărcare de la priza electrică

Când încărcătorul este conectat sau plasat pe un încărcător wireless, acesta încarcă aparatele auditive (dacă sunt plasate în încărcător) și încarcă bateria integrată în același timp.


Atât timp cât încărcătorul este încărcat de o sursă de alimentare externă, LED-ul încărcătorului arată starea de încărcare a bateriei integrate, iar LED-urile pentru instrumentele auditive arată starea instrumentelor auditive.

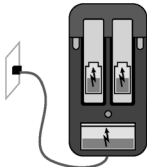

Pentru economisirea energiei după încărcarea wireless, LED-urile se vor opri după ce încărcătorul și instrumentele auditive sunt complet încărcate.

Încărcare mobilă

Când nu aveți la dispoziție o priză electrică, puteți încărca totuși instrumentele auditive. Energia este furnizată de bateria integrată a încărcătorului la instrumentele auditive. Încărcătorul trebuie să fie pornit pentru a face acest lucru.

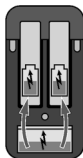


Starea de încărcare a încărcătorului și instrumentelor auditive este afișată apăsând butonul sau deschizând capacul.

Păstrarea în siguranță

Când încărcarea instrumentelor auditive este finalizată, depozitați instrumentele auditive în siguranță în interiorul încărcătorului, având capacul închis.

În cazul în care doriți să depozitați instrumentele auditive pentru o perioadă mai lungă de timp, aveți posibilitatea să opriți încărcătorul. Încărcătorul poate fi oprit numai atunci când nu există nicio sursă de alimentare conectată la încărcător.

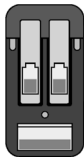

Pornirea sau oprirea încărcătorului


Când încărcătorul este conectat la o priză electrică, acesta este pornit automat și nu poate fi oprit.

Apăsați și țineți apăsat acest buton timp de 5 secunde pentru a porni sau opri încărcătorul, atunci când efectuați încărcarea mobilă.

- Când încărcătorul pornește, starea instrumentelor auditive și starea bateriei interne a încărcătorului sunt afișate timp de 7 secunde.
- Când încărcătorul se oprește, LED-ul frontal se aprinde verde și se estompează pe o perioadă de aproximativ 7 secunde. Oprirea este completă după aproximativ 7 secunde.

Încărcarea instrumentelor auditive

- ▶ Amplașați instrumentul auditiv pentru partea dreaptă în slotul de încărcare marcat cu un „R” (dreapta) și instrumentul auditiv pentru partea stângă în slotul de încărcare marcat cu un „L”.
- ▶ Aranjați căștile în mod corespunzător.
- ▶ Închideți capacul încărcătorului din motive de economisire a bateriei.

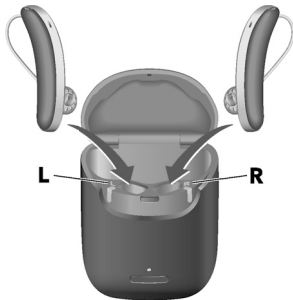

- Instrumentele auditive sunt oprite automat și încep să se încarce. Starea de încărcare este afișată timp de 7 secunde.

Dacă ledurile de stare nu luminează când introduceți instrumentele auditive, verificați următoarele:

- Instrumentele auditive nu sunt amplasate corect. Apăsați-le ușor în sloturile de încărcare sau închideți capacul încărcătorului.
- Încărcătorul este oprit. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul.

- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată pentru o încărcare mobilă. Conectați încărcătorul la o priză electrică.




NOTĂ

Dacă așezați un instrument auditiv în slotul de încărcare greșit, cablul receptorului se poate deteriora la închiderea capacului încărcătorului.

Starea de încărcare a instrumentelor auditive

Ledul de lângă instrumentul auditiv indică starea de încărcare a instrumentului auditiv. Rețineți că starea este afișată doar imediat după ce introduceți instrumentele auditive în încărcător sau când apăsați scurt butonul sau când deschideți capacul. Când încărcătorul este oprit, nu se afișează nicio stare.

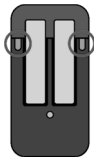

Descriere stare LED-uri

Verde intermitent

Instrumentul auditiv este încărcat.

Verde

Instrumentul auditiv este complet încărcat.

Descriere stare LED-uri

LED-ul este stins

Niciun instrument auditiv nu se află în încărcător, instrumentul auditiv nu este așezat corect sau încărcătorul este oprit.

Portocaliu intermitent

Fază de răcire. Încărcarea este reluată când dispozitivul s-a răcit. Consultați secțiunea „Depanarea problemelor”.

Roșu intermitent

Eroare instrument auditiv. Consultați secțiunea „Depanarea problemelor”.

Indicație de putere scăzută a instrumentelor auditive

Veți auzi un semnal de alarmă care indică faptul că bateria este aproape consumată. Semnalul va fi repetat la fiecare 20 minute. În funcție de utilizarea instrumentelor auditive, aveți aproximativ 1,5 ore pentru a încărca instrumentele auditive înainte ca acestea să se oprească.

Încărcarea bateriei interne a încărcătorului




NOTĂ

Utilizarea unor componente incompatibile poate duce la defecțiuni.

- ▶ Utilizați exclusiv sursa de alimentare și adaptorul specific țării respective furnizat odată cu încărcătorul.
- ▶ Utilizați doar cablul de alimentare USB furnizat împreună cu dispozitivul.
- ▶ Nu introduceți obiecte incompatibile sau străine în portul încărcătorului.
- ▶ Utilizați un adaptor de alimentare USB standard care acceptă o tensiune de ieșire de 5 V CC și un curent de ieșire de 0,5 până la 1 A.

Asigurați-vă că fișa electrică respectă cerințele. Consultați secțiunea „Cerințe pentru fișa electrică” din „Informații de siguranță pentru încărcător”.

- ▶ Conectați partea USB-C a cablului de alimentare USB la portul USB al încărcătorului ❶.
- ▶ Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare USB la o fișă electrică adecvată ❷.

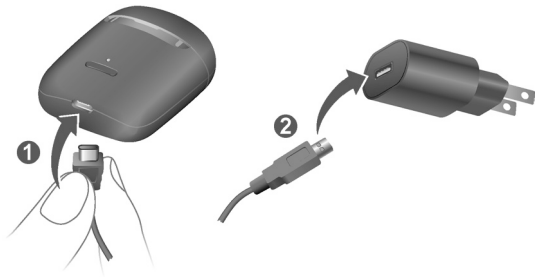

Bateria internă începe încărcarea. Când sunt introduse instrumentele auditive și acestea încep să se încarce. Starea de încărcare a încărcătorului este afișată permanent.

Încărcarea bateriei interne cu încărcare wireless



- Așezați încărcătorul pe un suport transmițător wireless. După câteva secunde, bateria internă va începe încărcarea indicată de LED-ul verde intermitent al încărcătorului.

Când sunt introduse instrumente auditive, va începe încărcarea acestora, de asemenea, indicată de LED-ul verde intermitent al LED-urilor instrumentelor


auditive. Dacă LED-ul este stins, vă rugăm să realiniați încărcătorul în centrul suportului transmițătorului.

Starea de încărcare a încărcătorului este afișată până când este complet încărcată. După aceea, LED-urile sunt oprite din motive de economisire a energiei.

Starea de încărcare a încărcătorului

Ledul din față indică starea de încărcare a încărcătorului și a bateriei sale interne.

Când bateria internă este încărcată, starea de încărcare este indicată în modul următor:

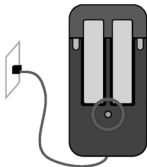

Descriere stare LED-uri

Verde intermitent

Bateria internă este încărcată.

Verde

Încărcătorul este complet încărcat.

Descriere stare LED-uri

LED-ul este oprit (încărcare wireless)

Încărcătorul este complet încărcat.

Portocaliu intermitent

Fază de răcire. Încărcarea este reluată când dispozitivul s-a răcit. Consultați secțiunea „Depanarea problemelor”.

Roșu intermitent

Eroare încărcător. Consultați secțiunea „Depanarea problemelor”.


Pentru o vedere de ansamblu a stării de încărcare a instrumentelor auditive, consultați secțiunea „Încărcarea instrumentelor auditive”.

Verificarea capacității bateriei încărcătorului

Pentru a verifica dacă bateria integrată a încărcătorului are o capacitate suficientă pentru a încărca instrumentele auditive complet, atunci când nu aveți la dispoziție o priză electrică:

- ▶ Deconectați încărcătorul de la priza electrică.
- ▶ Apăsați scurt butonul.

LED-ul din față indică starea de încărcare a bateriei interne a încărcătorului timp de 7 secunde.

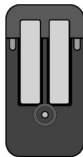

Descriere stare LED-uri

Verde

Bateria internă are o capacitate suficientă pentru a încărca două instrumente auditive complet.

Descriere stare LED-uri

Portocaliu

Bateria internă **nu** are o capacitate suficientă pentru a încărca două instrumente auditive complet.

Portocaliu intermitent

Bateria internă a încărcătorului este descărcată. Încărcarea instrumentelor auditive nu este posibilă.

Dacă ledul de stare nu luminează când apăsați butonul, verificați următoarele:

- Încărcătorul este oprit. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul.
- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată pentru a afișa starea. Conectați încărcătorul la o priză electrică, așteptați câteva minute și încercați din nou.



Bateria internă are o capacitate de 400 mAh.

Întrebări puse frecvent

Probabil aveți unele întrebări privind metoda optimă de încărcare a instrumentelor auditive. Citiți întrebările și răspunsurile de mai jos. Dacă aveți și alte întrebări, audiologul dumneavoastră vă va ajuta.



De ce nu pornesc instrumentele auditive când le scot din încărcător?

Verificați următoarele:

- Încărcătorul este oprit. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul. Consultați secțiunea „Pornirea sau oprirea încărcătorului”.

- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată.
Conectați încărcătorul la o priză electrică.

Acum scoateți instrumentele auditive din încărcător.



Cum pot opri instrumentele auditive fără să le încarc?

- Amplasați instrumentele auditive în încărcător.
Asigurați-vă că acestea sunt introduse corect (ledurile de stare luminează). Instrumentele auditive sunt oprite automat și încărcarea începe.
- Deconectați încărcătorul de la priza electrică.
- Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a opri încărcătorul. Încărcarea se oprește.



La ce trebuie să fiu atent/ă atunci când efectuez încărcarea?

Instrumentele auditive și încărcătorul trebuie să fie curate și uscate. Respectați condițiile de operare din secțiunea „Condiții de operare, transport și depozitare”. Evitați încărcarea la temperaturi ridicate, deoarece aceasta poate scurta durata de viață și capacitatea bateriei încorporate.

Dacă utilizați încărcătorul într-un mediu foarte cald, țineți cont de faptul că încărcarea se va opri dacă temperatura instrumentelor auditive sau a încărcătorului depășește 42 °C (107 °F). LED-ul instrumentului auditiv și/sau al LED-ului încărcătorului va lumina intermitent portocaliu în timpul fazei de răcire. Încărcarea este reluată automat după ce

dispozitivul s-a răcit. Nu atingeți instrumentele auditive până când LED-urile din față nu luminează intermitent verde, deoarece acestea pot fi fierbinți.

Întreținere și îngrijire

Curățarea



NOTĂ

Risc de accidente cauzate de șocuri electrice!

- ▶ Dacă este necesară curățarea, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.

- ▶ Curățați încărcătorul folosind un șervețel moale și uscat.
- ▶ Nu utilizați niciodată jet de apă și nu introduceți încărcătorul în apă.
- ▶ Nu sterilizați sau dezinfecțați încărcătorul.

Întreținere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreținerea și curățarea completă profesională a instrumentului.

Solicitați audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreținere, precum și asistență.

Informații importante privind siguranța

Informații privind siguranța pentru bateriile reîncărcabile cu litiu-ion



AVERTISMENT

O baterie reîncărcabilă cu litiu-ion este permanent integrată în dispozitivul dumneavoastră. Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la explozia bateriei reîncărcabile cu litiu-ion.

Risc de rănire, incendiu sau explozie!

- Respectați instrucțiunile de siguranță pentru bateria reîncărcabilă cu litiu-ion din această secțiune.



AVERTISMENT

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
Risc de electrocutare!

- Conectați încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 60950-1 și/sau IEC 62368-1.



AVERTISMENT

- ▶ Respectați condițiile de operare.
- ▶ Acordați atenție specială pentru a proteja dispozitivul împotriva căldurii extreme (de ex. flacără deschisă, cuptoare cu microunde, cuptoare cu inducție sau alte câmpuri de înaltă inducție) și razele soarelui.
- ▶ Încărcați instrumentele auditive doar cu un încărcător aprobat. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- ▶ Nu dezasamblați dispozitivul.
- ▶ Nu utilizați dispozitivul în atmosfere explozive.

- 
- ▶ Nu utilizați dispozitive care sunt deformate sau au urme evidente de deteriorare.
 - ▶ Nu utilizați dispozitivul dacă observați că performanțele acestuia se reduc considerabil după încărcare. Returnați dispozitivul audiologului dumneavoastră.
 - ▶ Nu eliminați dispozitivul în foc sau în apă.



AVERTISMENT

- ▶ Înlocuirea și repararea trebuie efectuate doar de către un profesionist. Așadar:
- ▶ Nu reparați sau înlocuiți dumneavoastră bateria reîncărcabilă cu litiu-ion.
- ▶ În cazul puțin probabil în care o baterie cu litiu-ion plesnește sau explodează, țineți toate materialele combustibile la distanță.

În oricare dintre cazurile de mai sus, returnați dispozitivul audiologului dumneavoastră.

Informații privind siguranța pentru încărcător

Siguranța personală pentru încărcător



AVERTISMENT

Risc de șoc electric!

- ▶ Nu utilizați dispozitive care sunt în mod evident defecte și returnați-le la punctul de vânzare.



AVERTISMENT

Pericol de rănire!

- ▶ Nu utilizați dispozitive care sunt în mod evident defecte și returnați-le la punctul de vânzare.



AVERTISMENT

Vă rugăm să țineți cont de faptul că modificările neautorizate ale produsului pot cauza daune ale acestuia sau răni.

- ▶ Utilizați doar componente și accesorii aprobate. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- ▶ Nu modificați acest produs fără autorizație din partea producătorului.
- ▶ În cazul în care acest produs este modificat, trebuie efectuate inspecții și teste corespunzătoare pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului.



AVERTISMENT

Risc de explozie!

- ▶ Nu utilizați dispozitivul în atmosfere explozive (de. ex. în zone miniere).



AVERTISMENT

Risc de arsuri!

- ▶ Nu amplasați nimic altceva decât aparatele auditive în încărcător.



AVERTISMENT

Pericol de sufocare!

Dispozitivul dumneavoastră conține componente mici care pot fi înghițite.

- ▶ Nu lăsați aparatele auditive, bateriile și accesoriile la îndemâna copiilor și persoanelor cu dizabilități mintale.
- ▶ În cazul ingerării componentelor, adresați-vă imediat unui medic sau unei unități medicale.



AVERTISMENT

Sistemele de încărcare pot intra în interferență cu dispozitivele de măsurare și echipamentele electronice.

- În spitale: Încărcătorul respectă standardele CISPR 35 și CISPR 32. Drept urmare, utilizarea încărcătorului în spitale trebuie permisă. Totuși, încărcătorul poate interfera cu anumite dispozitive extrem de sensibile. În astfel de cazuri, se vor lua măsuri corespunzătoare (mărirea distanței față de dispozitivele sensibile sau deconectarea încărcătorului de la sursa de alimentare).



AVERTISMENT

Interferențe cu dispozitivele implantabile

- ▶ Dispozitivul poate fi utilizat cu toate implanturile electronice care respectă standardul de compatibilitate electromagnetică ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 pentru implanturi umane.
- ▶ În cazul în care implantul dumneavoastră nu respectă standardul ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, consultați producătorul dispozitivului implantabil pentru informații privind riscul de perturbații.

Siguranța produsului pentru încărcător



NOTĂ

- ▶ Protejați dispozitivul împotriva căldurii extreme. Nu îl depozitați în lumina directă a soarelui.



NOTĂ

- ▶ Protejați dispozitivele împotriva umidității ridicate.



NOTĂ

- ▶ Nu uscați dispozitivele într-un cuptor cu microunde.



NOTĂ

- ▶ Evitați scăparea pe jos. Componentele interne se pot defecta.

Cerințe pentru fișa electrică

Utilizați o fișă electrică având o tensiune de ieșire de 5 V și un curent de ieșire minim de 500 mA.



AVERTISMENT

Risc de electrocutare!

- Conectați încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 60950-1 și/sau IEC 62368-1.

Informații suplimentare

Condiții de operare, transport și depozitare

Condiții de operare	Încărcare USB	Încărcare wireless
Temperatură	10–35 °C 50–95 °F	10–30 °C 50–86 °F
Umiditate relativă	20–75%	20–75%
Presiune atmosferică	1050–1060 hPa	1050–1060 hPa

În timpul perioadelor prelungite de transport și depozitare, vă rugăm să respectați următoarele condiții:

	Depozitare	Transport
Temperatură	10–40 °C	-20–60 °C
	50–104 °F	-4–140 °F
Umiditate relativă	10–80%	5–90%
Presiune atmosferică	1050–1060 hPa	1050–1060 hPa



AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

- Livrați bateriile, aparatele auditive și/sau încărcătorul respectând reglementările locale.

Date tehnice privind sursa de alimentare

Tensiune de intrare:	100–240 V c.a.
Curent de intrare:	0,15–0,3 A
Frecvență de intrare:	50–60 Hz
Tensiune de ieșire:	5 V c.c.
Curent de ieșire:	1 A

Informații privind eliminarea



NOTĂ

- ▶ Reciclați dispozitivele și ambalajele respectând reglementările naționale.



NOTĂ

- ▶ Pentru a evita poluarea mediului, nu aruncați dispozitivele în gunoiul menajer.
- ▶ Reciclați sau eliminați dispozitivele în conformitate cu reglementările locale.

Explicarea simbolurilor

Simboluri utilizate în acest document



Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.



Indică posibile daune materiale.



Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.



Întrebări puse frecvent.

Simboluri utilizate în acest document



Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene, consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.



Indică producătorul legal al dispozitivului.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj



Etichetă de conformitate pentru compatibilitate electromagnetică și radiocomunicații Australia, consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj



Nu eliminați acest dispozitiv împreună cu deșeurile menajere generale. Citiți mai multe în secțiunea „Informații privind eliminarea”.



Ambalajele pot fi reciclate.



Citiți și urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare.



A se păstra uscat în timpul transportului.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj



Temperatură în timpul transportului.
Citiți mai multe în secțiunea
„Condiții de operare, transport și depozitare”.



Umiditate relativă în timpul transportului.
Citiți mai multe în secțiunea
„Condiții de operare, transport și depozitare”.



Presiune atmosferică în timpul
transportului. Citiți mai multe în secțiunea
„Condiții de operare, transport și depozitare”.



Dispozitiv medical.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj



Compatibil cu încărcătoare fără fir certificate Qi.*



Bluetooth® tehnologie cu consum redus de energie.

* Logo-ul Qi este o marcă comercială a Wireless Power Consortium.

Depanarea pentru încărcător

Problema și posibilele soluții

Niciun LED nu se aprinde.

- Verificați dacă sursa de alimentare este conectată corect.
-

Problema și posibilele soluții

LED-urile pulsează portocaliu.

Încărcătorul a atins limita de temperatură și acum este în faza de răcire. Încărcarea este reluată după răcire (aproximativ 15 minute).

- Nu atingeți instrumentele auditive în timp ce LED-urile luminează intermitent în portocaliu. Instrumentele auditive pot fi fierbinți.
 - În cazul în care încărcătorul intră în faza de răcire de mai multe ori în timpul încărcării, asigurați-vă că așezați încărcătorul într-un mediu care respectă condițiile de funcționare recomandate.
-

Problema și posibilele soluții

LED-ul încărcătorului clipește roșu.

A apărut o eroare la nivelul încărcătorului.

- Scoateți instrumentele auditive din încărcător și deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.
- Reconectați încărcătorul la sursa de alimentare și reintroduceți instrumentele auditive în sloturile de încărcare.

Dacă LED-urile clipesc în continuare roșu:

- Scoateți instrumentele auditive din încărcător și deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.
 - Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
-

Problema și posibilele soluții

LED-ul instrumentului auditiv clipește roșu.

A apărut o eroare la nivelul instrumentului auditiv.

- Scoateți instrumentul auditiv respectiv din încărcător și deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.
 - Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
-

Consultați tehnicianul acustician audioprotector dacă întâmpinați alte probleme.

Informații importante

Informații privind conformitatea pentru încărcător

Marcajul CE arată conformitatea cu următoarele directive și regulamente europene:

- 2017/745 privind echipamentele medicale
- 2014/53/EU privind echipamentele radio
- 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase

Marcajul CE indică conformitatea cu anumite directive și reglementări europene. Textul complet al declarației de conformitate poate fi obținut de la www.wsaud.com/other.

Acest dispozitiv este conform cu EN 55011:2016/A1:2017
Grupa 1 Clasa B.

Acest dispozitiv respectă Partea 18 din Regulile FCC și
CAN RSS-216 / CNR-216.

Operarea face obiectul următoarelor condiții:

- acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare,
- acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, incluzând interferențe care pot cauza operare nedorită și
- utilizatorul trebuie să păstreze o distanță minimă de 20 cm în timpul procesului de încărcare.

Informații specifice fiecărei țări



Producător Legal

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lynge

Danemarca

Document No. 04853-99T02-3B00 RO

Order/Item No. 210 186 24

www.wsaud.com

Master Rev02, 03.2023

© 04.2023, WSAUD A/S. All rights reserved



www.wsa.com