

connexx

Smart Mic

Ghid de utilizare



Cuprins

Înainte de a începe	5
Introducere	5
Inclus în pachet	10
Componente	12
Pregătirea	14
Încărcarea	14
Împerecherea aparatelor auditive	17
Împerecherea smartphone-ului sau playerului de muzică	20
Anularea împerecherilor	23

Utilizare zilnică	24
Pornirea/oprirea	24
Reglarea volumului	25
Dezactivarea sunetului microfoanelor aparatelor auditive	26
❶ Efectuarea apelurilor telefonice	27
❷ Ascultarea muzicii	32
❸ Utilizarea ca microfon de la distanță	34
❹ Utilizarea ca telecomandă	37
Informații importante privind siguranța	39
Siguranța personală	39
Siguranța produsului	47

Informații importante	50
Scop prevăzut / Scop propus	50
Vedere de ansamblu indicator de stare și alimentare	51
Explicarea simbolurilor	55
Întreținere și îngrijire	58
Informații tehnice	59
Informații privind eliminarea	61
Informații privind conformitatea	62

Înainte de a începe



ATENȚIE

Citiți în întregime acest ghid de utilizare și urmați informațiile de siguranță din acest document pentru a evita deteriorările sau rănille.

Introducere

Smart Mic utilizează Bluetooth®* tehnologie pentru furnizarea următoarelor funcții.


* Marca Bluetooth și logo-urile sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către producătorul legal al produsului se face sub licență. Alte mărci comerciale și mărci înregistrate aparțin deținătorilor respectivi.

1 Căști pentru smartphone-uri

Sunetele de la smartphone-ul dumneavoastră vor fi transmise la aparatele auditive prin Smart Mic.

Vocea dumneavoastră este captată de Smart Mic și trimisă la smartphone.


Citiți mai multe în secțiunea „Efectuarea apelurilor telefonice”

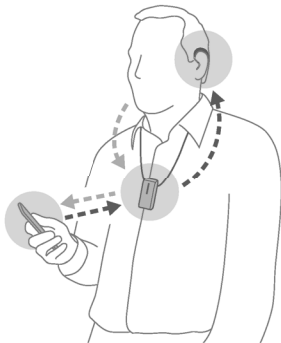

2 Căști pentru muzică

Muzica de la smartphone sau orice alt dispozitiv Bluetooth va fi transmisă la aparatele dumneavoastră auditive prin Smart Mic.


Citiți mai multe în secțiunea „Ascultarea muzicii”.

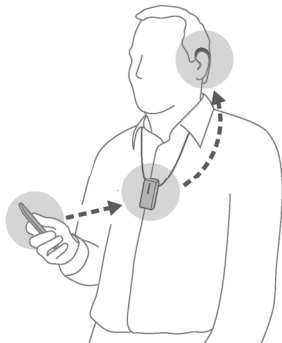

③ Microfon de la distanță

Vocea unui vorbitor selectat va fi transmisă wireless **de la Smart Mic la** aparatele dumneavoastră auditive.

Citiți mai multe în secțiunea „Utilizarea ca microfon de la distanță”.

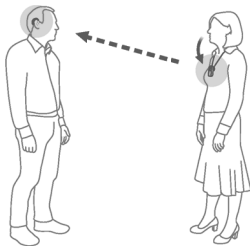


④ Telecomandă

Când Smart Mic nu transmite sunet, poate fi utilizat ca telecomandă pentru aparatele dumneavoastră auditive. Citiți mai multe în secțiunea „Utilizarea ca telecomandă”.


Inclus în pachet

- ① Smart Mic
- ② Șnururi (lungimi diferite)
- ③ Cablu USB pentru încărcare
- ④ Cablu de alimentare USB și fișă de alimentare (specifice țării)

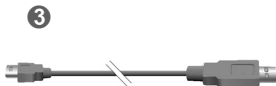

Componente

- ① Microfoane
- ② Indicator de alimentare 
- ③ Indicator de stare 
- ④ Clemă (rotativă)
- ⑤ Buton multifuncțional 
- ⑥ Butoane de volum  și 
- ⑦ Port USB pentru încărcare

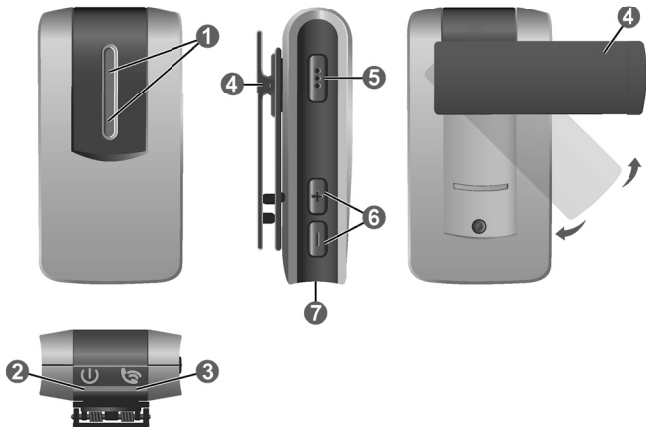


Pregătirea

Încărcarea

StreamLine Mic este încărcat parțial la livrare. Încărcați-l complet înainte de prima utilizare.

Când indicatorul de alimentare  este roșu aveți aproximativ 30 de minute rămase din timpul de streaming.

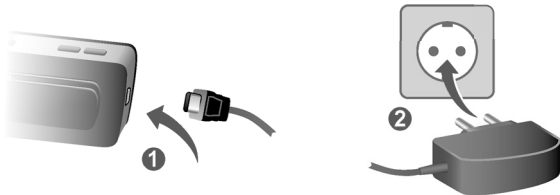

Indicatorul de alimentare indică starea de încărcare:

⏻	Descriere
Roșu	Bateria este aproape consumată
Lumină intermitentă verde	Încărcare (StreamLine Mic este pornit)
Lumină intermitentă portocalie	Încărcare (StreamLine Mic este oprit)
Lumina verde se estompează	Încărcarea este finalizată (StreamLine Mic este pornit)
Portocaliu	Încărcarea este finalizată (StreamLine Mic este oprit)

Informații suplimentare:

- De obicei, o încărcare completă durează 2 ore.
- Asigurați-vă că fișa de alimentare este ușor accesibilă pentru a putea fi deconectată de la sursa de alimentare dacă este necesar.



NOTĂ

- La încărcare, indicatorul de încărcare trebuie să fie aprins conform descrierii din acest ghid de utilizare. În cazul în care indicatorul de încărcare nu este aprins, deconectați dispozitivul de la încărcător și consultați audiologul dumneavoastră.



NOTĂ

- În timpul încărcării StreamLine Mic utilizați sursa de alimentare originală furnizată 5,0 V/1 A, cu marcaj CE și pentru siguranță.

Împerecherea aparatelor auditive

Aparatele dumneavoastră auditive trebuie împerecheate **o dată** cu Smart Mic. După aceasta, împerecherea este salvată în aparatele auditive și activată la fiecare pornire.

- Asigurați-vă că Smart Mic este oprit: Țineți apăsat  butonul până când indicatorul de alimentare  este oprit. Aceasta durează aproximativ 6 secunde.

► Opriți aparatele auditive și reporniți-le:

Deschideți și închideți compartimentele pentru baterii. Dacă aparatele auditive nu au un compartiment pentru baterii, opriți-le și reporniți-le în modul descris în ghidul de utilizare.

Aparatele auditive sunt acum pregătite pentru împerechere. Aveți 3 minute pentru a finaliza împerecherea.

- Porniți Smart Mic. Țineți apăsat  butonul până când indicatorul de alimentare  este verde. Aceasta durează aproximativ 3 secunde.

Indicatorul de stare  luminează intermitent în galben.

- Amplasați ambele aparate auditive aproape de Smart Mic (distanță maximă de 20 cm sau 8 inchi).

Procesul de împerechere începe automat.

Împerecherea este încheiată când indicatorul de stare este galben.



Împerecherea smartphone-ului sau playerului de muzică

Smartphone-ul dumneavoastră (sau playerul de muzică) trebuie împerecheat o dată cu Smart Mic. După aceasta, conexiunea este stabilită automat când Smart Mic este pornit și se află în distanța de operare.

- ▶ Țineți apăsat butonul  și butonul  simultan până când indicatorul de stare  luminează intermitent în albastru. Aceasta durează aproximativ 6 secunde.

Smart Mic este acum pregătit pentru împerechere. Aveți 3 minute pentru a finaliza împerecherea.

- ▶ Setați smartphone-ul sau playerul de muzică pentru a „căuta alte dispozitive Bluetooth”. Consultați manualul dispozitivului.

- ▶ Pe smartphone sau playerul de muzică, selectați „Smart Mic” din lista de dispozitive detectate.
- ▶ Dacă este necesar, introduceți PIN-ul „0000”.

Împerecherea este încheiată când indicatorul de stare  este albastru.

Informații suplimentare

- Smart Mic poate fi **împerecheat** cu până la opt dispozitive Bluetooth. Însă doar un singur dispozitiv poate fi **conectat** odată.
- La împerecherea cu alte dispozitive:
 - ☐ Smart Mic se va conecta la primul dispozitiv pe care îl detectează.
 - ☐ Pentru a comuta la un alt dispozitiv, dezactivați Bluetooth pe dispozitivul(ele) pe care nu doriți să îl(le) utilizați momentan.

Anularea împerecherilor

Pentru a anula toate împerecherile Smart Mic cu smartphone-uri și playere de muzică:

- ▶ Opriți Smart Mic: Țineți apăsat  butonul până când indicatorul de alimentare  este oprit. Aceasta durează aproximativ 6 secunde.
- ▶ Țineți apăsat simultan  butonul și  butonul și  butonul timp de 10 secunde.

Când împerecherile sunt anulate, indicatorul de stare luminează intermitent în roșu. Aparatele dumneavoastră auditive rămân împerecheate cu Smart Mic.

Utilizare zilnică

Pornirea/oprirea

Pornirea:

- ▶ Țineți apăsat  butonul până când indicatorul de alimentare  este verde. Aceasta durează aproximativ 3 secunde.

Indicatorul de stare  luminează intermitent în galben până când aparatele auditive sunt conectate.

Oprire:

- ▶ Țineți apăsat  butonul până când indicatorul de alimentare  este oprit. Aceasta durează aproximativ 6 secunde.

Reglarea volumului

Apăsați scurt  sau  pentru a regla volumul.

În funcție de tipul aparatelor dumneavoastră auditive, volumul este reglat după cum urmează:

- Opțiunea 1: În timp ce sunetul este transmis, doar sunetul de la Smart Mic (apel telefonic, vorbire sau muzică) este reglat. Când nu este transmis niciun sunet, volumul aparatelor auditive este reglat.
- Opțiunea 2: Sunetul de la Smart Mic (apel telefonic, vorbire sau muzică) și volumul aparatelor auditive sunt reglate împreună.

Dezactivarea sunetului microfoanelor aparatelor auditive

Țineți apăsat  butonul timp de 3 secunde pentru a dezactiva sunetul microfoanelor aparatelor auditive. Doar sunetul de la Smart Mic este redat în aparatele auditive.

În funcție de tipul aparatelor dumneavoastră auditive, puteți dezactiva sunetul microfoanelor aparatelor auditive după cum urmează:

- Opțiunea 1: Țineți apăsat  butonul timp de 3 secunde.
- Opțiunea 2: Apăsați scurt .

Această funcție este indisponibilă în timp ce Smart Mic este utilizat ca microfon de la distanță.

❶ Efectuarea apelurilor telefonice

Condiții preliminare: Smart Mic trebuie conectat la un smartphone și trebuie purtat în mod corect.

Purtarea corectă a Smart Mic



Smart Mic trebuie purtat în modul ilustrat în imagini pentru cele mai bune performanțe. Este important ca microfonul Smart Mic să fie orientat spre gură și Smart Mic să nu fie acoperit de haine etc.

Distanța maximă:

- Smartphone — Smart Mic: 10 m (33 ft)
- Aparare auditive — Smart Mic: 2 m (6,5 ft)

Recepționarea unui apel

Veți auzi un ton de apel în aparatele dumneavoastră auditive. Indicatorul de stare  luminează intermitent în verde.

- Pentru a accepta/finaliza apelul, apăsați scurt  sau acceptați/încheiați apelul cu smartphone-ul.
În timpul unui apel, indicatorul de stare  este verde.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat  butonul timp de aproximativ 3 secunde.

Efectuarea unui apel

Când apălați pe cineva cu smartphone-ul conectat, apelul este transmis automat la aparatele dumneavoastră auditive. În timpul unui apel, indicatorul de stare  este verde.

Această funcție este indisponibilă în timp ce Smart Mic este utilizat ca microfon de la distanță.

Informații suplimentare

- **Apelare vocală:** Atunci când sunteți conectat la un smartphone, apăsați de două ori  pentru a activa apelarea vocală (dacă este acceptată de smartphone).
- Pentru acest tip de conexiune, Smart Mic utilizează Profilul cu mâini libere (Hands-Free Profile – HFP) al Bluetooth.

② Ascultarea muzicii

Dacă Smart Mic este conectat la un player de muzică prin Bluetooth, muzica va fi redată automat în aparatele dumneavoastră auditive. Nu trebuie să utilizați nimic pe Smart Mic.

Când muzica este transmisă, indicatorul de stare  este portocaliu.

Distanțe maxime:

- Player de muzică — Smart Mic: 10 m (33 ft)
- Aparate auditive — Smart Mic: 2 m (6,5 ft)

Pornire/oprire muzică

- Utilizați smartphone-ul sau playerul de muzică pentru a porni/opri muzica.

Pentru a opri muzica, puteți, de asemenea, apăsa scurt  pe Smart Mic.


Informații suplimentare

- Pentru acest tip de conexiune, Smart Mic utilizează Profilul de distribuție audio avansată (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP) al Bluetooth.
- Dacă muzica este transmisă de la smartphone, apelurile sosite sunt indicate în timp ce muzica este redată.

③ Utilizarea ca microfon de la distanță

Funcția de microfon de la distanță nu pornește automat.
Trebuie să comutați la modul de microfon de la distanță prin intermediul  butonului.

Purtarea corectă a Smart Mic

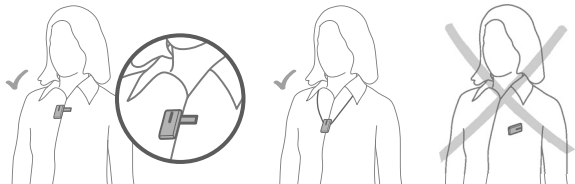

Utilizatorul trebuie să poarte Smart Mic în modul ilustrat în imagini pentru cele mai bune performanțe. Este important ca microfonul să fie orientat spre gura vorbitorului și Smart Mic să nu fie acoperit de haine etc.

Distanța maximă:

- Aparare auditive — Smart Mic: 20 m (66 ft)

Pornirea microfonului de la distanță

- Apăsați  timp de aproximativ 3 secunde.

Indicatorul de stare  este magenta. Un ton de confirmare este redat în aparatele dumneavoastră auditive.

Microfoanele de la distanță sunt pornite. Vorbirea de la persoana care poartă Smart Mic este transmisă direct la aparatele dumneavoastră auditive.

Oprirea microfonului de la distanță

- ▶ Țineți apăsat  butonul timp de aproximativ 3 secunde.

Indicatorul de stare  este albastru (conectat la un smartphone) sau galben (neconectat la un smartphone).

Informații suplimentare

- Atunci când purtați Smart Mic ca un microfon de la distanță, nu există conexiune la smartphone. În special apelurile sosite nu sunt indicate.
- Smart Mic are microfoane direcționale, adică microfoane care captează sunetul dintr-o anumită direcție.

④ Utilizarea ca telecomandă

Smart Mic se poate utiliza ca telecomandă pentru aparatele dumneavoastră auditive: Puteți ajusta volumul (consultați secțiunea „Reglarea volumului”), dezactivați sunetul microfoanelor aparatelor auditive (consultați secțiunea „Dezactivarea sunetului microfoanelor instrumentelor auditive”) sau comutați la următorul program auditiv (vezi mai jos).

Distanțe maxime:

- Aparat auditive — Smart Mic: 2 m (6,5 ft)

Comutarea la următorul program auditiv

► Țineți apăsat  butonul timp de aproximativ 3 secunde.

Această funcție este indisponibilă în timp ce Smart Mic este utilizat ca microfon de la distanță.

Informații importante privind siguranța

Siguranța personală



AVERTISMENT

Pericol de sufocare!

Dispozitivul dumneavoastră conține componente mici care pot fi înghițite.

- ▶ Nu lăsați aparatele auditive, bateriile și accesoriile la îndemâna copiilor și persoanelor cu dizabilități mintale.
- ▶ În cazul ingerării componentelor, adresați-vă imediat unui medic sau unei unități medicale.



AVERTISMENT

Risc de strangulare!

- ▶ Asigurați-vă că șnurul nu este prins, de ex. în părțile mecanice mobile ale echipamentelor.
- ▶ Utilizați doar șnurul separabil furnizat. Acesta se va detașa automat atunci când este prins într-o componentă.
- ▶ Nu utilizați șnurul pentru copii cu vârsta sub doisprezece ani.



AVERTISMENT

Risc de șoc electric!

- ▶ Nu utilizați dispozitive care sunt în mod evident defecte și returnați-le la punctul de vânzare.



AVERTISMENT

Vă rugăm să țineți cont de faptul că modificările neautorizate ale produsului pot cauza daune ale așteptate sau răni.

- ▶ Utilizați doar componente și accesorii aprobate. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- ▶ Nu modificați acest produs fără autorizație din partea producătorului.
- ▶ În cazul în care acest produs este modificat, trebuie efectuate inspecții și teste corespunzătoare pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului.



AVERTISMENT

Siguranța reîncărcării bateriilor utilizând un conector USB este determinată de echipamentul extern.

- ▶ Când conectorul USB este conectat la un echipament cuplat la o priză de perete, acest echipament trebuie să dispună de aprobare UL sau să respecte IEC 60065, IEC 60950 sau alte standarde de siguranță echivalente.



AVERTISMENT

Siguranța acestui dispozitiv, atunci când este conectat la un echipament extern (prin cablu de intrare auxiliar, prin cablu USB sau direct), este determinată de echipamentul extern.

- Când este conectat la un echipament extern cuplat la o priză de perete, acest echipament respectă IEC 60065, IEC 60950 sau alte standarde de siguranță echivalente.



AVERTISMENT

Risc de explozie în cazul manevrării necorespunzătoare a bateriei reîncărcabile.

- ▶ Nu scurtcircuitați, găuriți, striviți sau dezamblați bateria reîncărcabilă.
- ▶ Nu o aruncați în foc și nu o introduceți în cuptor.
- ▶ Nu o introduceți în apă.
- ▶ Încărcați bateria reîncărcabilă la o temperatură cuprinsă între 0 °C și 45 °C.
- ▶ Pentru repararea sau schimbarea bateriei reîncărcabile, returnați dispozitivul audiologului dumneavoastră.



AVERTISMENT

Implanturi active

- Se va acorda o atenție sporită implanturilor active. Dacă aveți un implant activ, contactați producătorul dispozitivului implantat pentru informații privind riscurile de perturbații.



AVERTISMENT

Acest dispozitiv poate intra în interferență cu echipamentele de măsurare și echipamentele electronice.

- ▶ Nu utilizați dispozitivul în avion sau în zone în care sunt utilizate echipamente electronice sensibile sau de terapie intensivă.



AVERTISMENT

Risc de explozie!

- ▶ Nu utilizați dispozitivul în atmosfere explozive (de. ex. în zone miniere).

Siguranța produsului



NOTĂ

- ▶ Protejați dispozitivul împotriva căldurii extreme. Nu îl depozitați în lumina directă a soarelui.



NOTĂ

- ▶ Protejați dispozitivele împotriva umidității ridicate.



NOTĂ

- ▶ Nu uscați dispozitivele într-un cuptor cu microunde.



NOTĂ

Diferitele tipuri de radiații puternice, de exemplu, în timpul radiografiilor, procedurilor RMN, în apropierea unui RMN inactiv sau pentru scanare CT, pot deteriora dispozitivele.

- Nu utilizați dispozitivele în timpul acestor proceduri sau în timpul unor proceduri similare.

Radiațiile slabe, de. ex. emise de un echipament radio sau de echipamentele de securitate din cadrul aeroportului nu deteriorează dispozitivele.



În unele țări există restricții privind utilizarea echipamentelor fără fir (wireless).

- Consultați autoritățile locale pentru informații suplimentare.



NOTĂ

Dispozitivele dumneavoastră sunt proiectate pentru a respecta standardele internaționale de compatibilitate electromagnetică, însă pot apărea interferențe cu dispozitivele electronice din apropiere. Într-un astfel de caz, îndepărtați-vă de sursa de interferență.

Informații importante

Scop prevăzut / Scop propus

Acest dispozitiv este destinat utilizării ca receptor și transmițător wireless de sunet între aparatele auditive și mediul înconjurător, inclusiv dispozitive audio wireless și de vorbire. Acest dispozitiv permite purtătorilor aparatelor auditive wireless să controleze funcționalitatea acestor aparate auditive.

Este destinat utilizării de către copii (> 36 luni) și adulți împreună cu aparatele lor auditive.

Vedere de ansamblu indicator de stare și alimentare

Indicator de stare



Descriere



Lumină intermitentă galbenă
Se caută aparate auditive.



Galben

Mod de repaus: Conectat la aparate auditive.

Neconectat la un smartphone sau un alt dispozitiv.



Iluminare intermitentă albastră

Smart Mic este vizibil pe un smartphone pentru
împerechere.



Descriere



Albastru

Mod telefon: Conectat la un smartphone.



Lumină intermitentă verde

Apel în sosire.



Verde

În timpul unui apel.



Portocaliu

Streaming muzică.



Magenta

Mod microfon de la distanță.



Descriere



Iluminare intermitentă magenta
Reconectare microfon de la distanță.

Indicator de alimentare



Descriere



Roșu
Bateria este consumată.



Lumină intermitentă verde
Încărcare în timp ce este pornit.



Lumina verde se estompează
Încărcarea este completă și Smart Mic este pornit.



Descriere



Verde

Pornit, neîncărcat.



Lumină intermitentă portocalie

Încărcare în timp ce este oprit.



Portocaliu

Încărcarea este completă și Smart Mic este oprit.

Explicarea simbolurilor

Simboluri utilizate în acest document



Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.



Indică posibile daune materiale.



Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.

Simboluri pe dispozitiv sau ambalaj



Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene, consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.



Etichetă de conformitate pentru compatibilitate electromagnetică și radiocomunicații Australia, consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.



Indică producătorul legal al dispozitivului.

Simboluri pe dispozitiv sau ambalaj



Nu eliminați acest dispozitiv la deșeuri menajere generale. Citiți mai multe în secțiunea „Informații privind eliminarea”.



Citiți și urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare.

Întreținere și îngrijire



NOTĂ

- ▶ Nu introduceți dispozitivul în apă!
- ▶ Nu curățați dispozitivul cu alcool sau benzină.



- ▶ Când este necesar, curățați dispozitivul cu o cârpă moale.
- ▶ Evitați lichidele de curățare abrazive, cu aditivi, precum amoniac, acid citric etc.

Informații tehnice

Aparate auditive compatibile

Smart Mic funcționează cu aparatele noastre auditive wireless specifice. Audiologul dumneavoastră vă va oferi informații în privința modelelor compatibile.

Condiții de funcționare, transport și depozitare

Condiții de operare

Temperatură	între 5 și 40 °C (41 și 104 °F)
Umiditate relativă	între 15 și 93 %; fără-condens
Presiune atmosferică	între 700 și 1060 hPa

În timpul perioadelor extinse de transport și depozitare, vă rugăm să țineți cont de următoarele condiții:

Transport și depozitare

Temperatură	între -20 și 70 °C (între -4 și 158 °F)
-------------	---

Presiune atmosferică	între 700 și 1060 hPa
-------------------------	-----------------------



AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

► Livrați Smart Mic respectând reglementările locale.

Pentru alte componente, precum aparatele auditive, se pot aplica alte condiții.

Date tehnice privind sursa de alimentare

Tensiune de intrare:	100–240 V c.a.
Curent de intrare:	max. 0,2 A la 100 V AC
Frecvență de intrare:	47–63 Hz
Tensiune de ieșire:	5 V CC
Curent de ieșire:	max. 1 A

Informații privind eliminarea

Reciclați dispozitivele, accesoriile și ambalajele respectând reglementările locale.

Informații privind conformitatea

Marcajul CE arată conformitatea cu următoarele directive și regulamente europene:

- 2017/745 privind echipamentele medicale
- 2014/53/EU privind echipamentele radio
- 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase

Textul complet al declarației de conformitate poate fi obținut de la www.wsaud.com/other.

Funcționalitate wireless (fără fir)

Dispozitivul conține un transmițător-receptor radio utilizând Bluetooth EDR, Bluetooth low energy (BLE) și o tehnologie radio pe unde scurte proprietară, toate lucrând la 2,4 GHz.

Transmițătorul radio la 2,4 GHz este slab și întotdeauna sub 17 dBm e.i.r.p. în ceea ce privește puterea radiată totală.

Acest dispozitiv respectă standardele internaționale privind transmițătoarele radio, compatibilitatea electromagnetică și expunerea umană.

Informațiile de conformitate FCC și ISED pot fi găsite pe partea din spate a dispozitivului.

Marcajul de conformitate ACMA dovedește  conformitatea cu standardele de interferență electromagnetică stabilite de Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Dispozitivele cu marcajul FCC respectă standardele FCC privind interferența electromagnetică.

Acest aparat digital de clasă B respectă standardul canadian ICES-003.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC și RSS de scutire licență ale ISED.

Operarea face obiectul următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe dăunătoare, și
- acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, incluzând interferențe care pot cauza operare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele prevăzute pentru un dispozitiv digital din clasa B în conformitate cu Partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecție

rezonabilă împotriva interferențelor nocive într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe nocive cu radiocomunicațiile. Totuși, nu există garanții că nu se vor produce interferențe în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, ceea ce se poate stabili prin închiderea și deschiderea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței de separare dintre echipament și receptor.

- Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați furnizorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Atenționare FCC: Orice schimbări sau modificări care nu au fost aprobate în mod expres de partea terță responsabilă cu conformitatea vor anula autorizația utilizatorului de a opera acest echipament.



Producător Legal

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lynge

Danemarca

Document No. 03385-99T05-3B00 RO

Order/Item No. 109 520 78

Master Rev06, 08.2024

www.wsaud.com

© 11.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



www.wsa.com