


Instrucțiuni de utilizare – Remote Control 2

Telecomanda Remote Control 2 este concepută pentru a permite schimbarea programelor și ajustarea volumului aparatelor auditive. Aceasta trebuie configurată în prealabil de către specialistul dvs. audioprotezist.



1. Prezentare generală

- Comutator pornit/oprit
- Indicator luminos: verde = baterie ok, galben = baterie scăzută, roșu = baterie foarte scăzută
- Butoane +/- pentru volum
- Buton schimbare program
- Buton „Home” pentru revenirea la setările inițiale
- Compartiment baterie (AAA 1.5V)

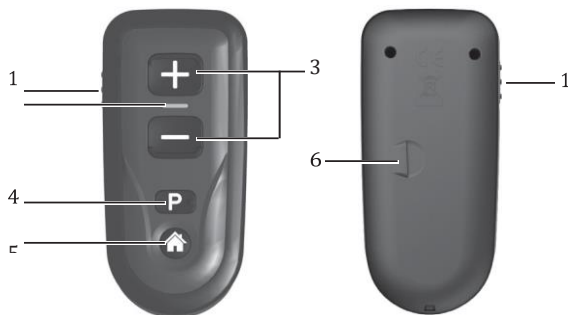

2. Pornire/Oprire

Glisați comutatorul lateral pentru a porni sau opri telecomanda.

Modul oprit previne trimiterea accidentală de comenzi.



3. Înlocuire baterie

- Deschideți capacul din spate
- Scoateți bateria veche
- Introduceți bateria nouă respectând polaritatea (+/-)

Portul mini-USB este doar pentru programare, nu pentru încărcare.



4. Avertizare baterie

Indicator galben sau roșu = bateria trebuie schimbată.

Opriți telecomanda când nu este utilizată pentru economie.

5. Instrucțiuni de utilizare

Țineți telecomanda la aprox. 1 metru de aparate. Nu este necesară orientarea directă spre acestea.

6. Indicator luminos

Se aprinde 2 secunde la pornire. Rămâne aprins cât timp apăsați un buton.

Dacă nu reacționează, este nevoie de reprogramare.

7. Ajustarea aparatelor auditive

- +/- ajustează volumul
- Program schimbă programul de ascultare
- Home revine la programul de pornire

Țineți Home 2 secunde pentru programul principal configurat.

8. Îngrijire și curățare

- Scoateți bateria dacă nu folosiți telecomanda perioade lungi
- Nu o scufundați în apă
- Dacă se udă, lăsați-o să se usuce natural 24h
- Nu o expuneți la temperaturi ridicate
- Curățați cu o cârpă umedă, fără detergenți

9. Ghid depanare

- Nu funcționează: verificați bateria, polaritatea, porniți telecomanda
- Nu răspunde aparatul auditiv: apropiați telecomanda

10. Avertismente

- Nu lăsați la îndemâna copiilor sub 3 ani
- Pacemaker: evitați purtarea în buzunarul de la piept
- Nu folosiți în zone cu risc de explozie
- Conectați doar accesorii aprobate
- Dacă apar probleme, contactați specialistul audioprotezist

11. Simboluri și conformitate

Dispozitiv certificat CE, respectă standardele UE aplicabile.

Temperaturi utilizare: -10° – 55°C, umiditate <95%

Pentru eliminare, folosiți centre de reciclare pentru echipamente electronice.

Distribuitor: Hansaton Akustik GmbH, Germania